

Налаштування індикаторів danalogic Extend BTE

	Дія програми	Увімкн.	Вимкн.	На зарядці		Низький заряд батареї
				Заряджається	Повністю заряджено	
Налаштування індикаторів	Вимкнено					
	Блимає один раз					
	Постійно блимає					

	Дія програми	Зміна гучності	Обмеження гучності	Статус програми	Прямий аудіовхід	Режим польоту
Налаштування індикаторів	Вимкнено	<input type="checkbox"/> Немає індикатора	<input type="checkbox"/> Немає індикатора	<input type="checkbox"/> Немає індикатора	<input type="checkbox"/> Немає індикатора	<input type="checkbox"/> Немає індикатора
	Блимає один раз	 1 при натисканні	 1 при досягненні	 Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4 1 при натисканні	 1 при активації	 1 x при активації (1 довге блимання, потім чотири подвійних блимання)
	Постійно блимає	 1 при натисканні	 1 при досягненні	 Програма 1 Програма 2 Програма 3 Програма 4 1 при натисканні	 1 при активації	 1 x при активації (1 довге блимання, потім чотири подвійних блимання)

Примітки.

- Попередження про низький заряд батареї має пріоритет над всіма іншими індикаторами.



Для додаткової допомоги відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів: danalogic.co.uk/patient-portal