


Загальні рекомендації з чищення та обслуговування

Ось кілька корисних порад, щоб зберігати слуховий апарат Danalogic в найкращому стані:

- Зберігайте слуховий апарат в чистому та сухому стані. Ви можете скористатися м'якою тканиною, щоб видалити жир або вологу та залишити руки чистими та сухими
- Не використовуйте воду або розчинники для чищення слухового апарата та не занурюйте його у воду чи іншу рідину
- Не кидайте слуховий апарат на тверді поверхні
- Не залишайте слуховий апарат на під прямим сонячним промінням або біля нього, наприклад в припаркованій машині, оскільки надмірна спека може пошкодити корпус
- Не вдягайте його в душі, під час плавання, під сильним дощем або у вологому середовищі, наприклад у сауні
- Знімайте слуховий апарат, коли наносите косметику, парфуми, засоби після гоління, лак для волосся або лосьйони, оскільки це може пошкодити ваш слуховий апарат
- Окрім цього, перевіряйте звуковід, купол, трубки, вкладиші на відсутність видимих блокувань та почистіть відповідним чином

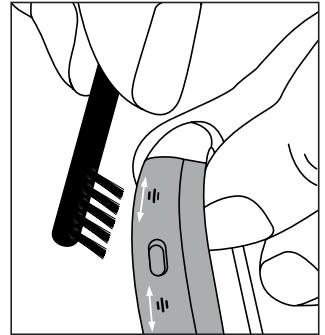

На верхній/задній частині слухового апарата знаходяться два мікрофонні входи. (з кожного боку верхньої кнопки). Мікрофони захищені звукопроникним фільтром, але, як будь-який фільтр, він може заблокуватися пилом чи брудом.

Використовуйте щітку для слухового апарата, щоб чистити кожен мікрофонний вхід через день.



Для додаткової допомоги відскануйте QR-код або відвідайте наш портал підтримки пацієнтів: **danalogic.co.uk/patient-portal**