


iPhone اور iPad کے ساتھ Danalogic Extend کی ہینڈز فری کالز سے کیسے لطف اندوز ہوں

براہ کرم یہاں ہماری ویب سائٹ

www.danalogic.co.uk/connectivity پر جا کر یقینی بنائیں کہ آپ کی ڈیوائس مطابقت پذیر ہے

آلہ سماعت
کا بٹن

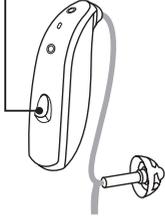

والیوم بٹنز

فنکشن	طریقہ کار
کال کا جواب دینے	اپنے آلہ سماعت کا بٹن چند لمحوں کے لیے دبائے رکھیں یا iPhone/iPad پر جواب دینے کے لیے سلائیڈ کریں
کال ختم کریں	کال بند کرنے کے لیے اپنے آلہ سماعت کا بٹن کچھ سیکنڈز کے لیے دبا کر رکھیں۔ متبادل طور پر، اپنی اسکرین پر سرخ بٹن پر ٹیپ کر کے کال منقطع کریں
دوسری آنے والی کالز	اگر آپ کال پر بات کر رہے ہوں اور آپ کو دوسری کال آ رہی ہو، تو آپ اپنے آلہ سماعت کے بٹن کو تھوڑی زیادہ دیر کے لیے دبا کر اسے منقطع کر سکتے ہیں یا iPhone یا iPad اسکرین پر 'منقطع کریں' پر ٹیپ کر سکتے ہیں
والیوم تبدیل کریں	iPhone یا iPad پر والیوم زیادہ یا کم کرنے والے بٹنز استعمال کریں
iOS آلہ سماعت کی ترتیبات میں ہینڈز فری کالز کو آف کریں	iOS آلہ سماعت کی ترتیبات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے iPhone پش بٹن پر تین مرتبہ کلک کریں (آپ کنٹرول سینٹر کے ذریعے بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں)۔ 'ان پٹ اختیارات' پھر 'آف' منتخب کریں۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: danalogic.co.uk/patient-portal

