

danalogic Extend BTE LED لائٹ کنٹرول کی ترتیبات

کم بیٹری	چارجر میں		آف کریں	آن کریں	سافٹ ویئر کی کارروائی	کنٹرول کی ترتیبات LED لائٹ
	مکمل چارج ہو گیا	چارجنگ				
...	غیر فعال کردہ	
...	ایک مرتبہ فلپش ہوگی	
...	مسلسل فلپش ہو رہا ہے	

فلائٹ موڈ	DAI	پروگرام کا اسٹیٹس	والیوم کی حد	والیوم تبدیل کریں	سافٹ ویئر کی کارروائی	کنٹرول کی ترتیبات LED لائٹ
کوئی لائٹ نہیں	کوئی لائٹ نہیں	کوئی لائٹ نہیں	کوئی لائٹ نہیں	کوئی لائٹ نہیں	غیر فعال کردہ	
... فعال ہونے پر 1 x (1 طویل بلنک، پھر چار ڈبل بلنکس)	... فعال ہونے پر 1 x	1 پروگرام 2 پروگرام 3 پروگرام 4 پروگرام دبانے پر 1 x	... پہنچنے پر 1 x	... دبانے پر 1 x	ایک مرتبہ فلپش ہوگی	
... فعال ہونے پر 1 x (1 طویل بلنک، پھر چار ڈبل بلنکس)	... فعال ہونے پر 1 x	1 پروگرام 2 پروگرام 3 پروگرام 4 پروگرام دبانے پر 1 x	... پہنچنے پر 1 x	... دبانے پر 1 x	مسلسل فلپش ہو رہا ہے	

نوٹس:
• کم بیٹری کی انتباہ کو دیگر تمام انڈیکٹرز پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: danalogic.co.uk/patient-portal

