


# عمومی صفائی اور دیکھ بھال کا مشورہ

یہاں آپ کے Danalogic آلہ سماعت کو بہترین ممکنہ حالت میں رکھنے کے لیے کچھ آسان تجاویز ہیں:

- اپنے آلہ سماعت کو صاف اور خشک رکھیں۔ آپ چکنائی یا نمی کو دور کرنے اور اپنے ہاتھوں کو صاف اور خشک کرنے کو یقینی بنانے کے لیے نرم کپڑا یا ٹشو استعمال کر سکتے ہیں
- اپنے آلہ سماعت کو صاف کرنے کے لیے پانی یا سالوینٹس کا استعمال نہ کریں، یا انہیں پانی یا دیگر مائع جات میں نہ ڈبوئیں
- اپنے آلہ سماعت کو سخت سطحوں پر گرانے سے گریز کریں
- اپنے آلہ سماعت کو براہ راست سورج کی روشنی میں یا اس کے قریب نہ رکھیں، جیسے گرم، پارک کی گئی گاڑی میں، کیونکہ زیادہ گرمی کیسنگ کو نقصان پہنچا سکتی ہے
- نہاتے، تیرتے وقت، موسلا دھار بارش میں یا نم ماحول میں جیسے سوتے ہوئے انہیں نہ استعمال کریں

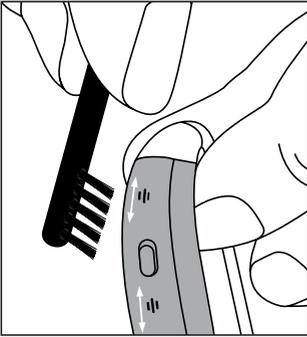

- کاسمیٹکس، پرفیوم، آفٹر شیو، ہیئر اسپرے یا لوشن لگاتے وقت اپنے آلہ سماعت کو ہٹا دیں کیونکہ یہ آپ کے آلہ سماعت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں
- ان کے علاوہ، براہ کرم کسی بھی واضح رکاوٹوں کے بغیر اپنی پتلی ٹیوب، ڈوم، ٹیوبنگ، ایئر مولڈ کو چیک کریں اور مناسب طریقے سے صاف کریں
- آلہ سماعت کے اوپر / مرکز میں دو مائیکروفون انلیٹس ہوتے ہیں۔ (اوپر پُش بٹن کے دونوں اطراف میں)۔ مائیکروفونز کو آواز کے شفاف فلٹر کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے؛ لیکن، کسی بھی دوسرے فلٹر کی طرح، اس میں دھول اور گند پھنس سکتا ہے۔

ہر دوسرے دن ہر مائیکروفون انلیٹ پر برش کرنے کے لیے آلہ سماعت کو صاف کرنے والے برش کا استعمال کریں۔

مزید معاونت کے لیے، QR کوڈ اسکین کریں یا درج ذیل ویب سائٹ پر ہمارا معاونتی پورٹل برائے مریض ملاحظہ کریں: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)

