



Glanhau a newid twibiau llysnafedd am danalogic Extend

Glanhau


Yn gyntaf, gallwch sychu'r tiwb tenau a chromen â chadach llaith. Os yw'r tiwb tenau wedi'i gau â chwyr neu weddillion eraill, tynnwch ef o'r cymorth clyw trwy dynnu'r tiwb cyfan yn ofalus oddi ar y cymorth clyw.

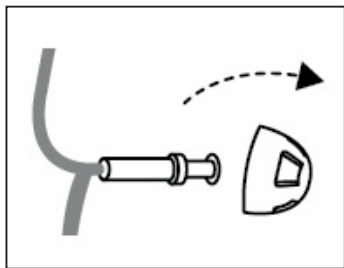

1. Nesaf, tynnwch y gromen drwy ei thynnu oddi ar y pen rhigolog.

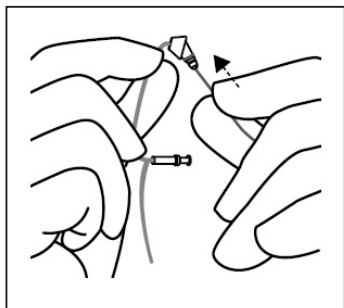


2. Nawr, gwthiwch y wifren lanhau drwy frig y tiwb tenau lle mae'n cysylltu â'r cymorth clyw. Pwythwch y wifren lanhau drwodd yn llwyr i dynnu unrhyw weddillion yn llawn.

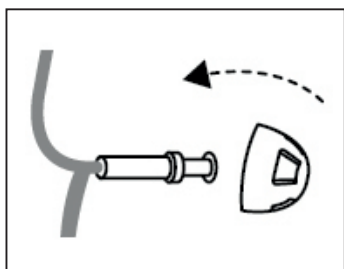


3. Nawr, gwthiwch y gromem yn ôl ar y tiwb tenau.

Glanhau a newid tiwbiau tenau i danalogic Extend (parhad)

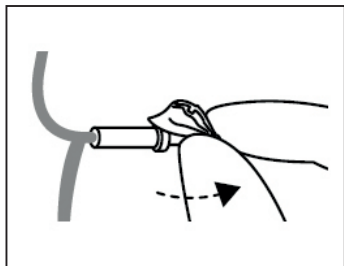

4. Gwiriwch fod y gromen yn gadarn drwy godi rhan is y gromen yn ofalus, a gwirio bod y coler yn cwmpasu pen rhigolog y tiwb tenau yn llwyr.

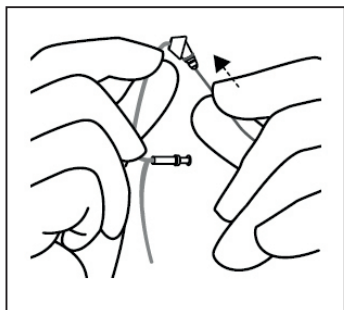

5. Yn olaf, gwthiwch y tiwb tenau yn ôl ar y cymorth clyw hyd ei fod yn clicio'n gadarn yn ei le.

Newid

Os oes angen i chi newid eich tiwb tenau tynnwch y tiwb cyfan oddi ar eich cymhorthion clyw a newidiwch ag un newydd, gan sicrhau bod hwn yn clicio'n gadarn i'w le. Dilynwch y cyfarwyddiadau uchod i sicrhau bod cromen newydd yn cael ei ffitio'n gywir ar eich tiwb tenau newydd.



Am ragor o gymorth, sganiwch y cod QR neu ewch i'n porth cymorth cleifion yn: danalogic.co.uk/patient-portal