


Sut i fwynhau Galwadau heb Ddwylo ar gyfer iPhone ac iPad gyda Danalogic Extend

Sicrhewch fod eich dyfais yn gydnaws drwy wirio'n gwefan yma www.danalogic.co.uk/connectivity

Swyddogaeth	Sut i
Ateb galwad	Defnyddiwch bwyso byr ar fotwm eich cymorth clyw neu sleidiwch i ateb ar yr iPhone/iPad
Gorffen galwad	Pwyswch a daliwch eich botwm cymorth clyw am ychydig eiliadau i orffen yr alwad. Fel arall, gorffennwch drwy dapio'r botwm coch ar eich sgrîn
Ail alwadau sy'n dod i mewn	Os ydych ar alwad ac mae gennych ail alwad yn dod i mewn, gallwch ei wrthod drwy ddefnyddio'r pwyso hir ar eich botwm cymorth clyw neu tapiwch 'Decline' ar y sgrîn iPhone neu iPad
Newidiwch y sain	Defnyddiwch y botymau sain i fyny ac i lawr ar yr iPhone neu iPad
Diffoddwch alwadau heb ddwylo yn y gosodiadau cymorth clyw iOS	Cliciwch y botwm gwthio iPhone deirgwaith i gyrchu'r gosodiadau cymorth clyw iOS (gallwch hefyd gael mynediad drwy'r Control Centre). Dewiswch 'Input Options' wedyn 'Off'.

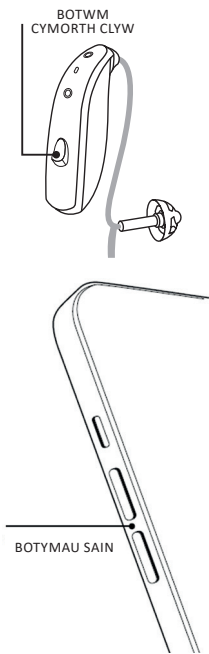

Am ragor o gymorth, sganiwch y cod QR neu ewch i'n porth cymorth cleifion yn: danalogic.co.uk/patient-portal