

# danalogic Extend BTE LED Gosodiadau rheoli golau

|                             | Gweithredu gan feddalwedd | Troi ymlaen | Diffodd | Mewn gwefrwr |                   | Batri isel |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------|--------------|-------------------|------------|
|                             |                           |             |         | Gwefru       | Gwefrwyd yn llawn |            |
| Gosodiadau rheoli Golau LED | Analluogwyd               |             |         | ...          |                   |            |
|                             | Flachio Unwaith           |             |         | ...          |                   |            |
|                             | Fflachio Parhaus          |             |         | ...          |                   |            |

|                             | Gweithredu gan feddalwedd | Newid sain         | Terfyn y sain          | Statws y rhaglen                                                       | DAI                 | Modd hedfan                                                |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Gosodiadau rheoli Golau LED | Analluogwyd               | <br>Dim golau      | <br>Dim golau          | <br>Dim golau                                                          | <br>Dim golau       | <br>Dim golau                                              |
|                             | Flachio Unwaith           | <br>1 x pan bwysir | <br>1 x pan gyrhaeddir | <br>Rhaglen 1<br>Rhaglen 2<br>Rhaglen 3<br>Rhaglen 4<br>1 x pan bwysir | <br>1 x pan ysgogir | <br>1 x pan ysgogir (1 blinc hir, wedyn pedwar blinc dwbl) |
|                             | Fflachio Parhaus          | <br>1 x pan bwysir | <br>1 x pan gyrhaeddir | <br>Rhaglen 1<br>Rhaglen 2<br>Rhaglen 3<br>Rhaglen 4<br>1 x pan bwysir | <br>1 x pan ysgogir | <br>1 x pan ysgogir (1 blinc hir, wedyn pedwar blinc dwbl) |

Nodiadau:

- Mae rhybudd batri isel yn cymryd blaenoriaeth dros bob dangosydd arall.



Am ragor o gymorth, sganiwch y cod QR neu ewch i'n porth cymorth cleifion yn: [danalogic.co.uk/patient-portal](https://danalogic.co.uk/patient-portal)

Y dewis cywir i'r GIG

danalogic GN